



RESPIRÁTOR FFP2 NR Model KDD1001


Návod k použití k ochrannému respirátoru

Popis: Filtrační polomaska FFP2, účinnost filtrace částic $\geq 95\%$

EN 149:2001 + A1:2009

Oznámený subjekt: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus,
Campus UAB, Apto Correos 18, 08193 BELLATERRA (Barcelona), Spain

Materiál: Netkaná textilie, filtrační materiál

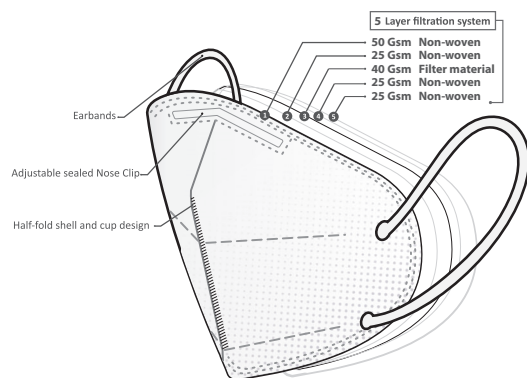

Návod k použití:



Před použitím nového respirátoru je třeba si umýt ruce. Ověřte si, jestli je maska neporušená.

- 1)** Otevřete skládací masku.
- 2)** Ujistěte se, že měkká nosní lišta se nachází na horní straně.
- 3)** Nasadte si pásek na ucho.
- 4)** Upravte měkkou nosní lištu tak, aby obepínala nosní část.
- 5)** Ujistěte se, že můžete dobře dýchat a že maska dobře těsní, pokud je to nutné, upravte si masku.

Podmínky skladování:

Teplota mezi -20°C až 40°C , relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Mělo by být zaručeno, že produkty ve skladu a při přepravě budou nepoškozené, neznečištěné, neovlivněné vlhkostí. Věnujte pozornost protipožární ochraně, odolnosti proti dešti, kyselinám, zásadám, vyhněte se umístění na světle.

Životnost a funkčnost respirátoru:

Maximální životnost respirátoru s filtrační třídou FFP2 je jedna pracovní směna - 8 hodin. Tento respirátor pomáhá chránit proti kontaminujícím částicím, ale zcela nevylučuje vystavení riziku nakažení chorobou či infekcí.

Péče a údržba respirátoru:

Respirátory jsou určeny pro jedno použití. Dezinfekce alkoholem, mytí vodou nebo saponátem podstatným způsobem snižuje funkčnost respirátoru a může jej nevratně poškodit.

Bezpečnostní varování při používání respirátorů:

Důrazně doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní varování. Bez jejich dodržení může dojít k výraznému snížení účinnosti respirátoru, případně i k poškození zdraví.

Je-li respirátor jakkoliv vizuálně poškozený nebo je-li kontaminovaný, ihned ho zlikvidujte a vyměňte za nový. Je-li respirátor zmačkaný, může být podstatně narušena jeho účinnost, proto ho nepoužívejte. Respirátor noste na hladkém a oholeném obličeji. Vousy nebo vlasy snižují těsnost mezi obličejem a respirátorem. Respirátor nepoužívejte v prostorech, kde je nedostatek kyslíku, tzn. v atmosféře, kde je kyslíku méně než 19,5 %. Respirátor nepoužívejte ve špatně větraných prostorech nebo ve výbušné atmosféře. Nepoužívejte respirátor při autolakování, při hašení požáru nebo pískování. Respirátor nedezinfikujte alkoholem, ani neomývejte vodou nebo saponátem. Respirátor je určen pouze pro jedno použití. Opakované použití je zakázáno. Je-li respirátor vlhký, ihned ho vyměňte. Pokud si respirátor sundáváte z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části, ale pouze ušních popruhů. Při přepravě respirátoru ho vždy nechte v původním obalu. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho v originálním obalu a mimo kontaminované oblasti. Použitý respirátor likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Symbols:

- Pozor
- Čtěte návod k použití
- Opakovaně nepoužívat
- Skladovat mezi -20°C a 40°C
- Chránit před slunečním zářením
- Chránit před vlhkem
- Výrobce
- Použit do data
- Označení shody s číslem Notifikované osoby

Qingdao KANGDUODUO
Protective Equipment Co., Ltd
West of Sili Village, Lancun Town,
Jimo District, Qingdao City, Shandong
Province, China.

Dovozce: Briton Group Limited
3 Ripple Road, Barking IG11 7ND,
United Kingdom

Certifikát ke stažení: www.appluslaboratories.com

CE
0370

